




APPLICATION DES FAUX SEINS SILICONE AMOLUX DIAMOND

Nettoyer le buste avec une pochette pré-imprégnée - AMOLUX Skin Tonic Towel. Laisser sécher. Plus la peau est saine, propre et sèche, plus les faux seins adhèrent. Ne poser pas les doigts sur la face adhésive afin de ne pas l'endommager. L'épilation ou le rasage de la paroi thoracique peuvent renforcer l'adhérence.

Abaissez la bretelle de votre soutien-gorge et sortez votre bras. Penchez vous.

Utilisez votre autre main pour maintenir la bretelle et avancer le bonnet du soutien-gorge.

Prendre votre faux sein au creux de votre main, en vous penchant, placez le faux sein dans le bonnet du soutien-gorge.

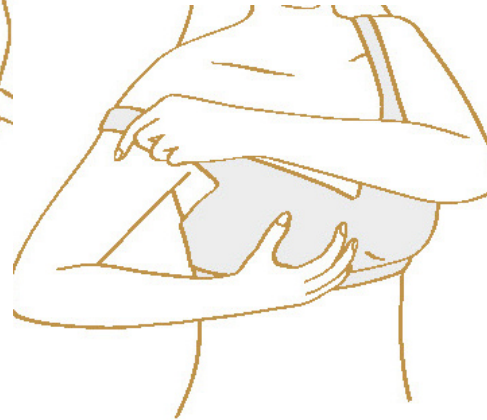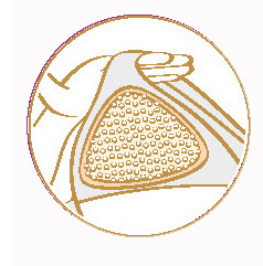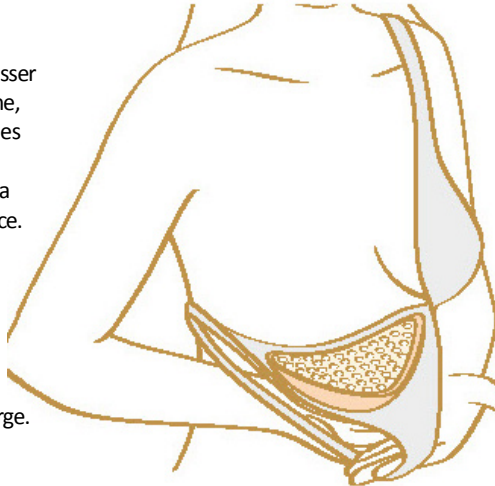


Assurez-vous qu'il est bien en place dans le bonnet, pointe à la jonction de la bretelle.

Appuyez sur votre faux sein à l'aide la main libre pour qu'elle trouve parfaitement sa place.

Remettez votre faux sein en place et appuyez à nouveau pour vous assurer qu'il tient bien.

Si ce côté est bien en place, procédez pour l'autre comme vous l'avez fait pour le premier.

Vérifiez l'application. Dans le cas où l'un ou l'autre de vos faux seins a besoin d'être réajustée, enlevez les faux seins et recommencez l'opération.

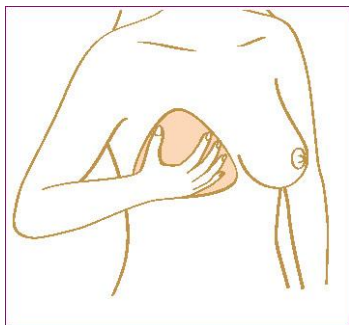

1. Placez votre main votre faux sein et penchez-vous en avant jusqu'à ce que vous sentiez le poids dans votre main.

2. Il peut arriver que les deux côtés du faux sein adhèrent entre eux. Dans ce cas, laissez tremper votre faux sein quelques instants dans l'eau.

4. Placez vos doigts aussi près que possible des bords du faux sein.

5. Veillez à manipuler avec soin si vous avez des ongles longs. Ils peuvent endommager le film.

6. En cas de trop forte adhérence, n'essayez pas de glisser vos doigts entre le faux sein et votre buste. Vous risqueriez d'endommager la face adhérente. Enlevez-votre faux sein en humidifiant la face sous la douche.



INSTRUCTIONS : RETIRER LES FAUX SEINS AMOLUX DIAMOND



Humidifiez la brosse spécifique -AMOLUX Soft Brush - avec de l'eau. Répartir trois gouttes de solution de nettoyage AMOLUX Soft Cleanser sur la surface adhérente encore sèche. N'utilisez aucun autre produit.

1. Brossez ensuite fermement toute la surface adhérente avec des mouvements circulaires, environ 1 à 2 minutes.

2. Important : rincez ensuite abondamment à l'eau claire, presque chaude.

3. Laissez sécher à l'air libre ou utilisez un sèche-cheveux à faible température

4. Nous vous recommandons un nettoyage après chaque utilisation pour obtenir une adhérence optimale.

5. La garantie des faux seins ne s'applique que s'ils sont utilisés avec la solution de nettoyage AMOLUX Soft Cleanser et avec les pochettes pré-imprégnées AMOLUX Skin Tonic.

